



# EXTRA WASH CHEM

REF C6500650 6x50 ml

C6500650A 6x50 ml



For in vitro medical device

Per uso diagnostico in vitro

## Uso

La soluzione sistemica extra è usata per le operazioni di lavaggio di celledette ottiche per i sistemi di chimica clinica **gesan Chem 500 – gesan Chem 200**.

Grazie all'eccellente capacità di riduzione della tensione superficiale rimuove efficacemente una vasta gamma di contaminanti ed è facilmente sciacquabile con acqua deionizzata.

## Preparazione

La soluzione di lavaggio cuvette è pronta all'uso.

## Conservazione e stabilità

La soluzione di lavaggio cuvette è stabile fino alla data di scadenza se conservato a 15-25°C, se richiusa dopo il prelievo, protetta da contaminazione.

## Precauzioni ed avvertenze

Il prodotto non è classificato come sostanza pericolosa (D.Lgs. n. 285 art. 28 Legge n.128 del 1998).

## Smaltimento rifiuti

Il prodotto deve essere smaltito secondo le normali normative in materia di gestione dei rifiuti.

## Simbologia

	Rischio biologico
	Marchi CE (prodotto conforme ai requisiti della dir. CE 98/79)
	Dispositivo medico-diagnostico in vitro
	Codice del lotto
	Utilizzare entro
	Limiti temperatura di conservazione
	Consultare istruzioni per l'uso
	Gesan Productio srl

## Use

Systemic solution extra is used to wash optical cells .

Due to its excellent reduction of surface tension, it removes efficiently a wide range of contaminations and it is easily rinsed away with de-ionized water.

## Preparation

Optical cells wash is ready to use.

## Storage and stability

Optical cells wash is stable until the deadline if stored at 15-25°C, closed after taking, protected from contamination.

## Precaution in use

The product is not classified as dangerous (DLg. N. 285 art. 28 l. n. 128/1998).

## Waste management

Please refer to the local legal requirements.

## Symbols

	Biological risk
	CE Mark (98/79 CE regulation)
	in vitro medical device
	Batch Code
	Use by
	Storage temperature limits
	Read instruction for use
	Gesan Production srl

Extra Wash Chem  
mod7.3.5-r0 10-2006

**Gesan Production s.r.l.**

Via Fiera dell'Eremita, 71 – Campobello di Mazara (TP) – Part. IVA 01928730819  
Tel +39 0924 912534 – Fax +39 0924 912534 // INTERNET : [WWW.GESANPRODUCTION.IT](http://WWW.GESANPRODUCTION.IT) - e-mail: [gesan@gesanproduction.it](mailto:gesan@gesanproduction.it)